

DESIFOR- PLEXIFEE

Verkaufseinheiten

Flasche mit Sprühkopf à 500 ml (Karton 20x500 ml)

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

20593

20594



Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
- DEKRA-zertifizierte Materialverträglichkeit für Acrylglas
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



Anwendungsbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich. Einsetzbar auch auf Acrylglas.

Anwendungsanleitung

Fläche mit DESIFOR-PLEXIFEE wischen bzw. flächendeckend benetzen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	5 min	EN 13697 (niedrige Belastung, hohe Belastung) EN 16615 (niedrige Belastung, hohe Belastung) VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	100 %	30 min	EN 14348 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	100 %	30 min	EN 14348 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	1 min	EN 14476 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	60 min	EN 16777 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	100 %	60 min	EN 14476 (niedrige Belastung, hohe Belastung)

Wirkstoffe

100 g enthalten 0,113 g 2-Phenoxyethanol; 0,125 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,113 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin

BAuA Reg.-Nr. N-86838

BAG Reg.-Nr. CHZN6971

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1 g/cm³
GIS-CODE: GD20

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260611



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/desifor-plexifree>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

